



QUADTRO® SELECT™-KISSEN

POSITIONIEREN

Das QUADTRO SELECT setzt Massstäbe in der umfassenden Verwirklichung des Sitzens im Rollstuhl. Jeder einzelne Benutzer profitiert von der individuellen Anpassung an seine Bedürfnisse durch einfaches Drücken eines Knopfes. Das revolutionäre ISOFLU™ Memory Control™ bietet dynamische Anpassungsmöglichkeiten für den Benutzer während des Sitzens und erlaubt schnelle und leichte Einstellungen zur Optimierung der Wirksamkeit.

HAUTSCHUTZ

SITZSTABILITÄT

Mit der eingebauten Sitzstabilität und der dynamischen Einstellungsmöglichkeit des QUADTRO SELECT-Kissens muss nicht länger der Schutz der Haut zur Erzielung der Sitzstabilität und besseren Sitzpositionierung zurückgestellt werden. Das QUADTRO SELECT-Kissen bietet alles: stabile Sitzposition bei grösstmöglichem Hautschutz – ohne jede Einschränkung.

EINFACHE HANDHABUNG

QUADTRO® SELECT™-KISSEN

POSITIONIEREN

Das QUADTRO SELECT-Kissen bietet schnelle und einfache Positionierung während des Sitzens. Drücken des grünen Knopfes in die „offene“ Position erlaubt die Anpassung des Kissens in die gewünschte Sitzposition. Durch das Drücken des roten Knopfes in die „geschlossene“ Position wird die Sitzhaltung stabilisiert.

HAUTSCHUTZ

Basierend auf über 30jährigen wissenschaftlichen Untersuchungen sowie Erfahrungen mit Benutzern bietet die patentierte ROHO-DRY-FLOATATION®-Technologie die einzigartige Möglichkeit zur Erhaltung der Hautdurchblutung bei der Einstellung und Anpassung an sich ändernde Sitzhaltungen.

SITZSTABILITÄT

Das QUADTRO SELECT-Kissen bietet eine Stabilität, die zuvor bei keinem luftgefüllten Kissen erzielt werden konnte. Diese ergibt sich aus der Aufteilung des

Kissens in seine vier Quadranten durch einfaches Schliessen des ISOFLO™ Memory Control™ und verringert so die Möglichkeit der seitlichen- oder Vor- und Rückwärtsbewegung.



EINFACHE HANDHABUNG

Alle Anpassungen werden während des Sitzens des Benutzers auf dem Kissen vorgenommen und ein unnötiger Transfer von und auf das Kissen zur Einstellung vermieden. Zusätzlich ermöglicht das QUADTRO SELECT dem Benutzer gewünschte Positionsänderungen während des Tages, je nach seinen aktiven Erfordernissen.



VORTEILE + EIGENSCHAFTEN

- ANPASSUNG + WIEDEREINSATZ:** individuell auf jeden Benutzer einstellbar.
- GERINGES GEWICHT:** leichter Transport, einfache Handhabung, 2 kg Gewicht.
- REINIGUNG:** Das Kissen: einfach mit Wasser und Seife. Bezug: Waschmaschine bis 40 °C.
- MATERIAL:** Neopren, kleine Defekte können mit dem mitgelieferten Reparatur-Set geflickt werden.
- BELÜFTUNG:** die einzelnen Noppen lassen Luft bis an die Hautoberfläche und vermeiden Hitze- und Nässestau.

EINSATZBEREICHE

- Das QUADTRO SELECT-Kissen (10 cm Höhe) ist das effektivste Kissen für Benutzer
- die grösstmögliche Druckentlastung benötigen
 - mit asymmetrischer Sitzhaltung
 - mit Anspruch auf progressive Sitzpositionierung
 - die erhebliche Unterstützung der Sitzhaltung benötigen
 - mit mässiger oder schlechter Sitzbalance
 - mit kippbaren Rollstühlen (nach vorne oder hinten abkippar)
 - mit progredienten Krankheitsbildern

BESCHREIBUNG

- LIEFERUMFANG:** QUADTRO SELECT-Kissen, Zwei-Weg-Stretch-bezug, Hand-Luftpumpe, Reparatur-Set und Gebrauchsanweisung
- MATERIAL:** schwer entflammbares Neopren
- GRÖSSEN:** geeignet für Rollstühle von Grösse 30 cm bis 52 cm (immer im Abstand von 4 – 5 cm Noppenbreite)
- GARANTIE:** 24 Monate Gewährleistung auf Material- und Verarbeitungsfehler

WEITERE ROHO®-PRODUKTE



nexus® SPIRIT™ Kissen



ENHANCER® Kissen